


MINI•POST VERFAHRENSANLEITUNG

1 Positionierung

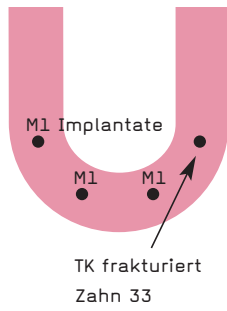


MP-1-07

2 Grobe Formgebung

des Zahnes über Gingiva-Niveau




3 Gates 2 x

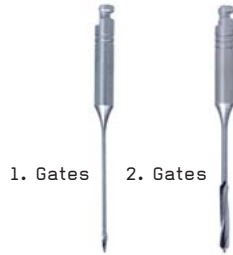

MP-2-01
MP-2-02

4 Planierer

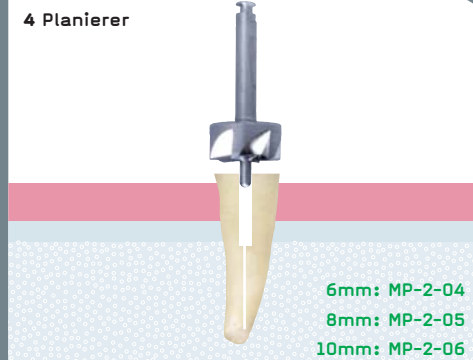

5 Gewinde
schneiden mit
Einbringschlüssel
und wieder
herausschrauben



M1-2-03


6 Disk anpassen mit beiliegender
Spezialfräse oder
alternativ Kompositaufbau



7 Zement mit dem
Lentulo einbringen



8 Einschrauben
des MP

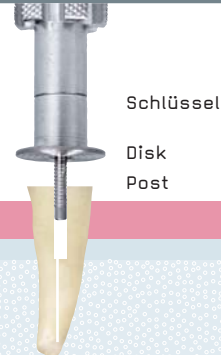

9 Definitive Position



10 Tipp

Abrechnung als BEMA Nr. 90
„Wurzelstiftkappe“ möglich
+ Eigenlabor! (z.B. Verbindungselement)

Weiteres Vorgehen analog
MINI•EINS Implantat ab Abb. 9