


# MINI•POST VERFAHRENSANLEITUNG

## 1 Positionierung

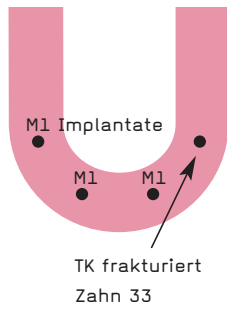


MP-1-07

## 2 Grobe Formgebung

des Zahnes über Gingiva-Niveau




## 3 Gates 2 x

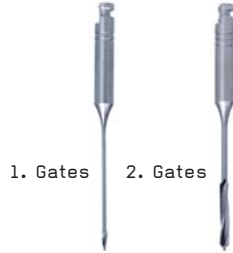

MP-2-01  
MP-2-02

## 4 Planierer

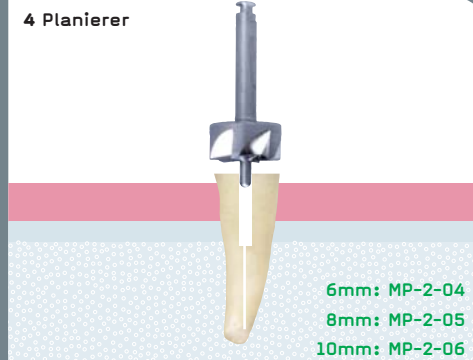

5 Gewinde  
schneiden mit  
Einbringschlüssel  
und wieder  
herausschrauben



M1-2-03


6 Disk anpassen mit beiliegender  
Spezialfräse oder  
alternativ Kompositaufbau



7 Zement mit dem  
Lentulo einbringen



8 Einschrauben  
des MP

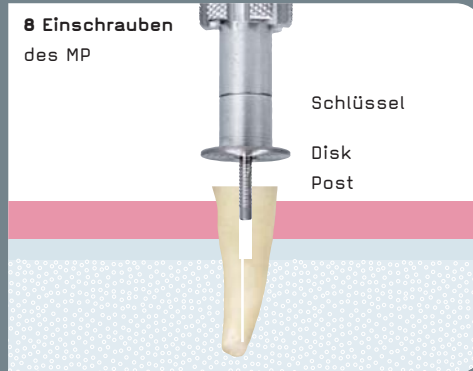

## 9 Definitive Position



## 10 Tipp

Abrechnung als BEMA Nr. 90  
„Wurzelstiftkappe“ möglich  
+ Eigenlabor! (z.B. Verbindungselement)

Weiteres Vorgehen analog  
MINI•EINS Implantat ab Abb. 9