



JMP•DENTAL

Vorgehensweise für Easy Graft und Easy Graft Crystal



Schritt für Schritt:

Öffnen Sie den Beutel mit der Spritze, die mit easy-graft™ Granulaten gefüllt ist. Öffnen Sie den Beutel mit dem BioLinker. Füllen Sie den BioLinker in die Spritze. Vermischen Sie beide Komponenten und entsorgen Sie überschüssigen BioLinker. Die Granulate sind nun klebrig und können direkt in den Defekt appliziert werden.